

### 1. Anwendung

Das Gleittuch besteht aus Silikon beschichteten Nylongewebe, es ist sehr glatt und gleitet deshalb sehr gut. Das Gleittuch erleichtert den Transfer des Patienten im Bett. Schwere, immobile oder schmerzempfindliche Patienten können somit leichter und für den Patienten schonend und verletzungsfrei positioniert und ohne große Anstrengungen umgelagert werden. Durch das Gleiten den Nylonbahnen aufeinander werden Einwirkungen von Reibungs- und Scherkräften auf der Haut des Patienten beim Umlagern weitergehend vermindert. Das Gleittuch wird vor allem im Bett zum Drehen und Positionieren des Patienten verwendet.

### 2. Sicherheit beim Einsatz

**Beachten Sie, dass der Reibungswiderstand durch den Einsatz der Gleittuches deutlich reduziert wird und der auf dem Gleittuch liegende Mensch wesentlich leichter bewegt werden kann (Vorsicht am Rand des Bettes/ der Liege). Reduzieren Sie also Ihren Kraftaufwand bzw. vermeiden Sie das Arbeiten mit Schwung, um Verletzungen des auf dem Gleittuch liegenden Menschen zu vermeiden.**

### 3. Überprüfung

Auch Gleittücher unterliegen dem Alterungsprozess. Daher ist es erforderlich, regelmäßig Überprüfungen durchzuführen, um so sicherzustellen, dass sich die Produkte in einem einwandfreien Zustand befinden. Im Einzelnen sind die folgenden Überprüfungen vorzunehmen.

- **Optische Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist, dass also das Material und die Nähte nicht beschädigt sind.
- **Mechanische Überprüfung:** Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand, indem Sie Zug auf das Material und eventuelle Griffe ausüben. Das Material muss diese Belastung aushalten und darf nicht reißen.
- **Überprüfung der Gleitfähigkeit:** Das Material ermöglicht aufgrund seiner glatten Oberfläche ein einfaches Gleiten. Überprüfen Sie auch diese Eigenschaft, am einfachsten kann die im direkten Vergleich zu einem neuen oder einem neueren Produkt erfolgen.

Falls ein Produkt bei der Überprüfung nicht allen Anforderungen entspricht, darf es nicht mehr eingesetzt werden.


### 4. Material: 100% silikonbeschichtetes Nylon

### 5. Reinigung

**Nur Wischdesinfektion, mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln**



nicht waschen

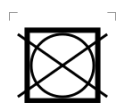

nicht tumblern



nicht bügeln

**6. Entsorgung:**

Entsorgung über Restmüll

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Fälle sind dem Hersteller und für Deutschland der BfArM, für Österreich der BASG und der Schweiz der Swissmedic mitzuteilen.

**Hersteller**

**Tiersch Gesundheit**

**Ortsstraße 14a**

**07907 Tegau**

**Tel. 036648 22629**

Gleittücher/Gleitlaken sind ein Medizinprodukt der Klasse I nach der Verordnung (EU) 217/745.

