

Auch unter [www.online-sanitaetshaus24.de](http://www.online-sanitaetshaus24.de)

---

### 1. Allgemeine Beschreibung des Produktes:

Lagerungskissen in der Pflege dienen der Druckentlastung und Positionierung von Patienten, um Dekubitus (Wundliegen) vorzubeugen und den Liege- Komfort zu erhöhen. Die korrekte Anwendung ist wichtig und sollte an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Eine typische Anwendung ist die 5- oder 6-Kissen-Lagerung, wobei Kissen unter Kopf, Schulter, Rücken, Bein und Ferse platziert werden.

### 2. Zweckbestimmung:

Sie sind individuell einsetzbar und dienen der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- oder Freilagerungsprinzip und unterstützen bei der Lagerung besonders gefährdeter Körperbereiche wie z. B. Schulter, Sakralbereich, Gesäß, Ferse. Sie dienen der Unterstützung von Entlastungslagerungen und Lageveränderungen sowie der Stabilisierung von Lagepositionen der Pflegenden insbesondere im Bett.

### 3. Anwendung:

Durch das Einsetzen dieser Lagerungskissen kann man die Auflagefläche vergrößern und somit den Druck am gefährdeten bzw. betroffenen Bereich verringern. Mit diesen Kissen kann man den Betroffenen umlagern und in seiner Position stabilisieren. Sie sind Bestens geeignet für die Dekubitusprophylaxe/Therapie und sind bei allen Lagerungsarten und Lagerungstechniken einsetzbar. Die Altenpflege lässt sich mit diesen Kissen um ein Vielfaches leichter bewältigen. Darüber hinaus erfüllen sie beim unterstützenden Einsatz bei bestimmten Krankheitsbildern rehabilitative oder proaktive Zwecke.

### 4. Indikationen:

Anwendung bei der Dekubitusprophylaxe und Therapie

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitäts- einschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen

- wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist
- im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses
- zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen
- Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses
- zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs

### Wichtig:

Regelmäßige Kontrollen der Haut und der Kissenposition sind wichtig, um Druckstellen und Hautirritationen zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten sollte auf atmungsaktive Bezüge geachtet werden

### 5. Kontraindikationen:

Keine direkte Anwendung auf offenen Wunden!

**6. Warnhinweise:**

Nicht Anwenden bei Beschädigungen des Außenmaterials!

**7. Material**

**Kissen weißer Bezug**

Material Hülle	65% Polyester, 35% Baumwolle
Füllung	60% 28er Würfel, 40% PP-Schwarz Kugeln
Reinigung	Waschbar 60°, Trocknen im Tumbler bis 80°

**Kissen grüner Bezug**

Material Hülle	54% Polyester, 46% PU
Füllung	60% 28er Würfel, 40% PP-Schwarz Kugeln
Reinigung	Wischdesinfektion

**8. Reinigung**

Waschen der weißen Kissen bei maximal 60°C.

Nach dem Waschen erst nach vollständiger Trocknung (80°C), wieder benutzen!

Kissen grüner Bezug nur Wischdesinfektion, mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln.

**9. Entsorgung:**

Entsorgung über Restmüll

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Fälle sind dem Hersteller und für Deutschland der BfArM, für Österreich der BASG und der Schweiz der Swissmedic mitzuteilen.

**Hersteller**

**Tiersch Gesundheit**

**Ortsstraße 14a**

**07907 Tegau**

**Tel. 036648 22629**

Lagerungskissen/Beinkammerkissen sind ein Medizinprodukt der Klasse I nach der Verordnung (EU) 217/745.

